



ミスゼロ子 e v 薬品マスタ更新手順書 (USB)

第 1 版

薬品マスタ更新手順書

USB 方式



① インターネットが閲覧できるパソコンで web サイトにアクセスします

(「ミスゼロ子」と検索)

・「薬品マスタ」アイコンをクリックします

↓ ミスゼロ子パソコン Windows10ユーザー

薬品マスタ更新 (EV MINI バージョン)

EV MINI

↓ DOWNLOAD

・ 202 年 月度薬品マスタ第2版をリリースしました 202 年 月 日

② Windows10 ユーザ

EV バージョンの DOWNLOAD

ボタンをクリックします。

薬品マスタ更新手順書

 <p>ご連絡したパスワードを入力し送信ボタンを押してください。</p> <p>パスワード: <input type="password"/> <input type="button" value="送信"/></p>	<p>③ パスワード入力画面が表示されます お知らせしましたパスワードを入力してください。</p>		
	<p>④ 保存先をデスクトップから USB メモリに変更します ・USB メモリに保管したファイルをミスゼロ子パソコンのデスクトップに移動します</p>		<p>⑤ ファイルをダブルクリックします</p>
	<p>⑥ 新しくフォルダが作成されます</p>		<p>⑦ フォルダ内の「○○○○年○○月度プログラム 第○版 win10.exe」をダブルクリックして下さい</p>
	<p>⑧ 「はい」をクリックしてしばらくお待ちください。</p>		<p>⑨ ハンディターミナルの使用を停止して「更新開始」をクリックしてください</p> <p>【赤枠】 例) 処方数 30 錠の場合に 14 錠シートをピッキングすると「2 シート + 2」と表示される機能です。</p>
	<p>⑩ 「薬品マスタ更新は正常に終了しました。」と表示されます 「終了」をクリックし完了</p>		<p>⑪ デスクトップに保存されたフォルダとプログラムを削除してください</p>