


ミスゼロ子 e v 薬品マスタ更新手順書 (USB)

第 1 版

薬品マスタ更新手順書

USB 方式

 <p>The screenshot shows the Miszero website homepage. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Miszero Service, Support, Company Info, and Contact. The main content area features a banner for 'Miszero Pickering Monitoring System' and a grid of service icons. The '薬品マスタ' (Drug Master) icon, which includes a pill and a checkmark, is highlighted with a red rectangular box. Other icons include 'Miszero Product Info', 'Media Release', 'Miszero FAQ', 'Manual', and 'Support FAQ'.</p>	<p>① インターネットが閲覧できるパソコンで web サイトにアクセスします （「ミスゼロ子」と検索）</p> <p>・「薬品マスタ」アイコンをクリックします</p>
 <p>The screenshot shows a page titled 'ミスゼロ子パソコン Windows7ユーザー' (Miszero PC Windows7 User). Below the title is a blue button labeled '薬品マスタ更新 (EV MINI バージョン)' (Drug Master Update (EV MINI Version)). Underneath, there is a section for 'EV MINI' with a 'DOWNLOAD' button highlighted by a red box. To the right of the button, it says '2021年9月度薬品マスタ第2版をリリースしました 2021年10月4日' (We released the 2nd edition of the 9th month drug master on October 4, 2021).</p>	<p>② Windows7 ユーザ EV バージョンの DOWNLOAD ボタンをクリックします。</p>

薬品マスタ更新手順書

 <p>ご連絡したパスワードを入力し送信ボタンを押してください。</p> <p>パスワード <input type="password"/> <input type="button" value="送信"/></p>	<p>③ パスワード入力画面が表示されます お知らせしましたパスワードを入力してください。</p>		
	<p>④ 保存先をデスクトップから USB メモリに変更します ・USB メモリに保管したファイルをミスゼロ子パソコンのデスクトップに移動します</p>		<p>⑤ ファイルをダブルクリックします</p>
	<p>⑥ 新しくフォルダが作成されます</p>		<p>⑦ フォルダ内の「○○○○年○○月度プログラム第○版win10.exe」をダブルクリックして下さい</p>
	<p>⑧ 「はい」をクリックしてしばらくお待ちください。</p>		<p>⑨ ハンディターミナルの使用を停止して「更新開始」をクリックしてください 【赤枠】 例) 処方数 30 錠の場合に 14 錠シートをピッキングすると「2 シート + 2」と表示される機能です。</p>
	<p>⑩ 「薬品マスタ更新は正常に終了しました。」と表示されます 「終了」をクリックし完了</p>		<p>⑪ デスクトップ保存されたフォルダとプログラムを削除してください</p>