ミスゼロ子 e v 在庫薬品マスタ更新手順書(USB)

第1版

薬品マスタ更新手順書

USB 方式



 インターネットが閲覧できるパソコンで web サイトにアクセスします (「ミスゼロ子」と検索)

・「薬品マスタ」アイコンをクリックします

 Windows7ユーザ 在庫オプションバージョンの DOWNLOAD ボタンをクリックします。

ご連絡したパスワードを入力し送信ボタンを押してください。		③ パスワード入力画面が表示されます	
パスワード		お知らせしましたパスワードを入力してください。	
Controls Controls	 ④ 保存先をデスクトップ から USB メモリに変更 します ・USB メモリに保管した ファイルをミスゼロ子パ ソコンのデスクトップに 移動します 	1 1	⑤ ファイルをダブル クリックします

薬品マスタ更新手順書

	⑥ 新しくフォルダが作成 されます	Image: 1 100 + 8.0707/04 Bios - L X Image: 1 100 + 8.0707/04 Bios - L X Image: 1 100 + 8.0707/04 Bios V D P Image: 1 100 + 8.0707/04 Bios V D P Image: 1 100 + 8.0707/04 Bios V D P Image: 1 200 + 8.0707/04 Bios V D P Image: 1 200 + 8.0707/04 Bios V D P Image: 1 200 + 8.0707/04 Bios V D P Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 P Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1 Image: 1	 フォルダ内の「【在 庫】○○○○年○○ 月度プログラム第 ○版 win7.exe」を ダブルクリックし て下さい
家品マスタ更新 × ・ ・ ・	⑧ 「はい」をクリックし てしばらくお待ちくだ さい。	 ◎ ミスゼロ子楽品マスタ更新 – □ × ■ Windows 202 年 月度[在庫ユーザー様用] ハンディターミナルの使用を停止し 更新開始ボタンを押してくたさい。 更新開始 キャンセル 更新開始 キャンセル ビッキング時のシート表示データを更新する 	 ⑨ ハンディターミナ ルの使用を停止し て「更新開始」をク リックしてください 【赤枠】 例)処方数 30 錠の場 合に 14 錠シートをピ ッキングすると「2 シ ート + 2」と表示され る機能です。
 ◎ :スゼロ子楽品マスク更新 – □ × ₩indows 202 年 月度【在庫ユーザー様用】 薬品マスタ更新は正常に終了しました。 重新問題	 ① 「薬品マスタ更新は正常に終了しました。」と表示されます 「終了」をクリックし完了 	202 年 月度プロ グラム第1版Win 202 年 月度プロ 202 年 月度プロ グラム第1版Win	 デスクトップに保存されたフォルダ とプログラムを削除してください